


REGULOWANA ELEKTRYCZNIE PODPÓRKA POD PLECY I GŁOWĘ DO ŁÓŻKA

SPBDORMEE

Instrukcja instalacji i obsługi

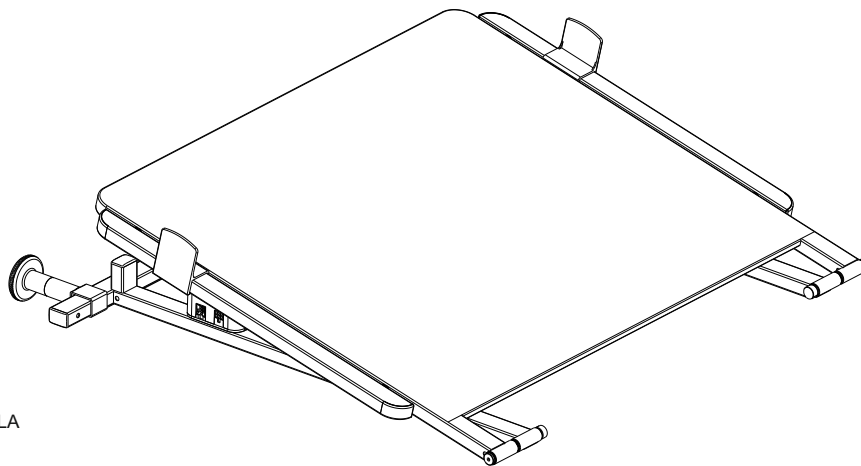

max
90KG




WYPRODUKOWANO W P.R.C. DLA
SPACETRONIK SP. Z O.O.
UL. WIŚNIOWA 36
64-000 KOŚCIAN, POLAND
INFO@SPACETRONIK.STORE
WWW.SPACETRONIK.STORE

Rysunki mają jedynie charakter poglądowy,
rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej.
Przed instalacją i użytkowaniem produktu zapoznaj się z instrukcją.

SPIS TREŚCI


1. Parametry produktu	P1
2. Przygotowania do instalacji produktu	P1
3. Spis części składowych	P2
4. Zalecany pasujący rozmiar	P3
5. Specyfikacja funkcjonalna pilota zdalnego sterowania	P4
6. Parowanie podwórki z pilotem zdalnego sterowania	P5
7. Instrukcja instalacji	P6-P16
8. Rozwiązywanie problemów	P17
9. Uwagi	P18

Parametry produktu

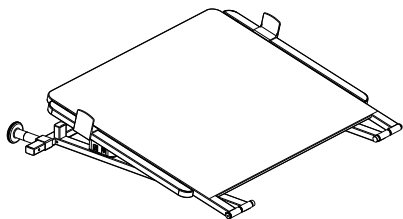


Nazwa produktu	Regulowana elektrycznie podpora pod plecy i głowę do łóżka		
Nr katalogowy	SPBDORMEE		
Kąt pochylenia	4°÷60°	Nośność	90 kg
Pobór mocy	AC 100 V÷240 V	Hałas	< 60 dB


Przygotowania do instalacji produktu

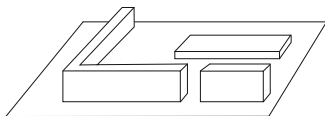

Instaluj na wykładzinie,
aby zapobiec zarysowaniom podłogi.

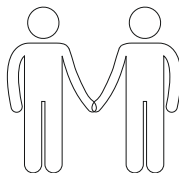








Do montażu będziesz potrzebować
dwóch lub większej liczby osób.

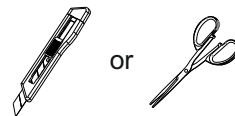


Nóż lub nożyczki (zapewnia Klient).

Spis części składowych

Uwaga: Poniższe rysunki mają jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. Jeśli brakuje jakichkolwiek narzędzi lub występują problemy z instalacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

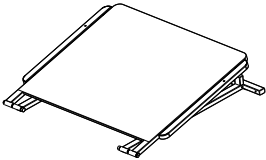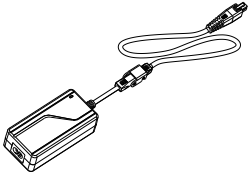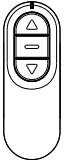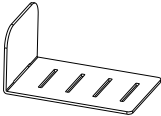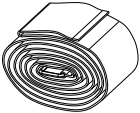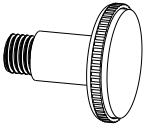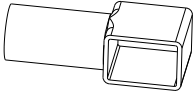
1. Rama podpórki + pokrowiec materiałowy (x1)	2. Zasilacz (x1)	3. Pilot zdalnego sterowania (x1)	4. Kabel zasilający (x1)	5. Ogranicznik tylny (x2)
				
6. Ogranicznik boczny (x2)	7. Pas mocujący 2 mb dł. (x2)	8. Krótka śruba (x2)	9. Długa śruba (x2)	10. Nakrętka (x2)
				

Zalecany pasujący rozmiar

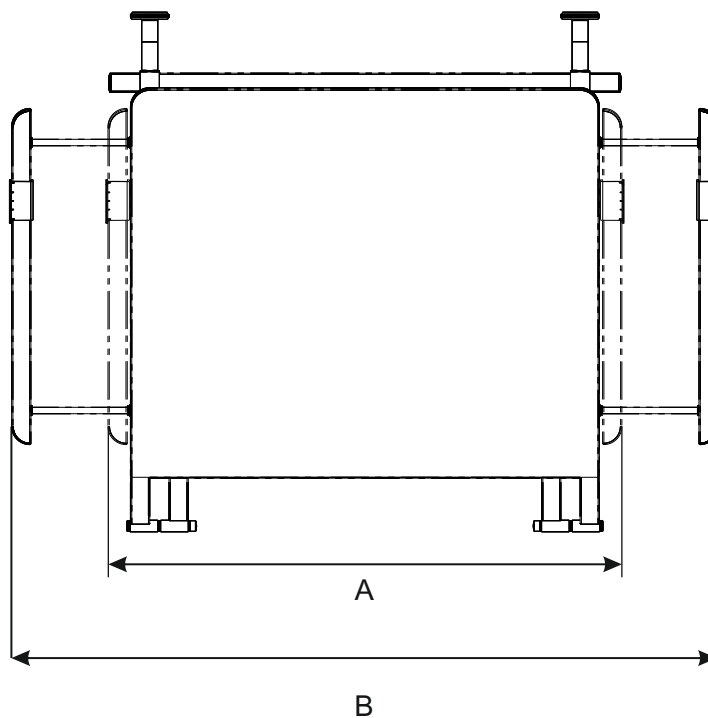

Model produktu	Szer. początkowa A	Szer. maksymalna B	Pasuje do materaca o szer.
SPBDORMEE-02	800 mm	1100 mm	800÷1100 mm
SPBDORMEE-03	1200 mm	1600 mm	1200÷1600 mm

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

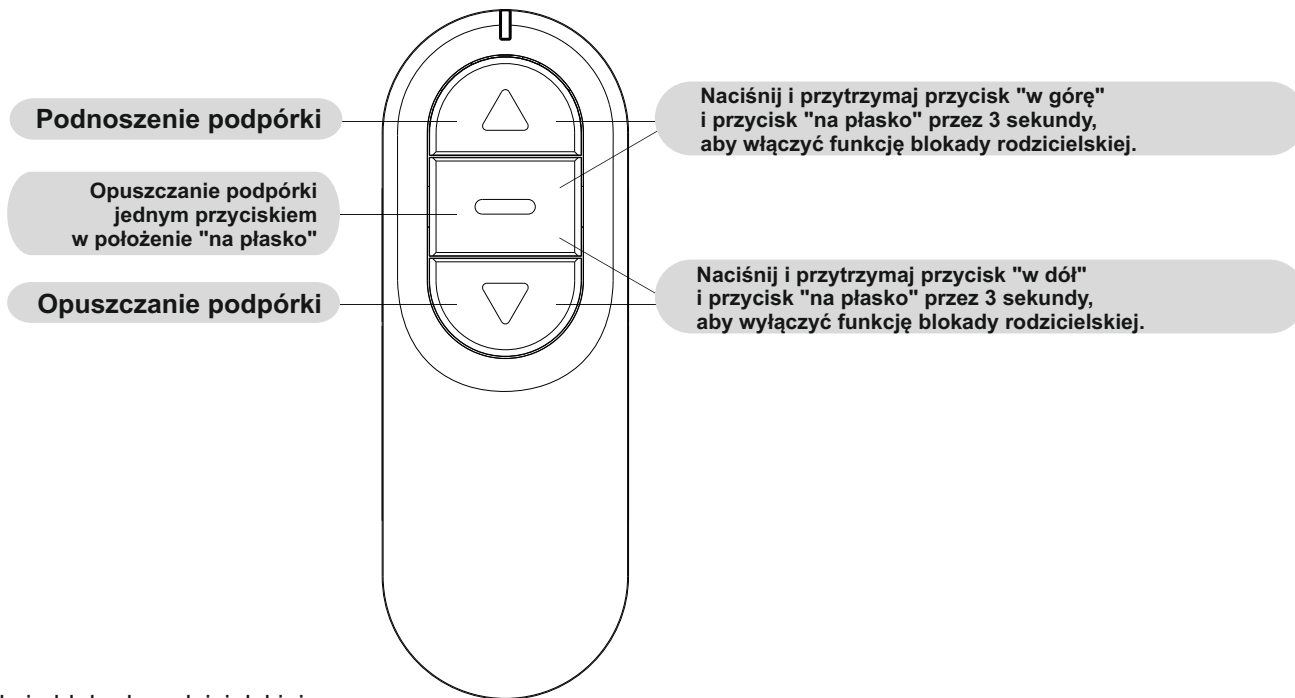



● Funkcja blokady rodzicielskiej:

1. **Włączanie blokady rodzicielskiej:** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez 3 sekundy. Lampka zamiga 3 razy, a następnie będzie się świecić światłem ciągłym, wskazując, że blokada rodzicielska jest włączona. Gdy blokada rodzicielska jest włączona podstawowe funkcje tych przycisków nie są dostępne. Po naciśnięciu dowolnego przycisku lampka zamiga 2 razy.
2. **Wyłączanie blokady rodzicielskiej:** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez 3 sekundy. Lampka zamiga 2 razy, a następnie zgaśnie po 3 mignięciach, wskazując, że blokada rodzicielska jest wyłączona. Gdy blokada rodzicielska jest włączona podstawowe funkcje tych przycisków są ponownie dostępne.

Parowanie podpórki z pilotem zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania jest sparowany z podpórką przez producenta. Jeśli okaże się, że przyciski na pilocie działają nieprawidłowo lub jeśli wymienisz pilota na inny, sparuj go ponownie zgodnie z poniższą instrukcją.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "w górę" i przycisk "w dół", aby wejść w tryb parowania pilota z podpórką.

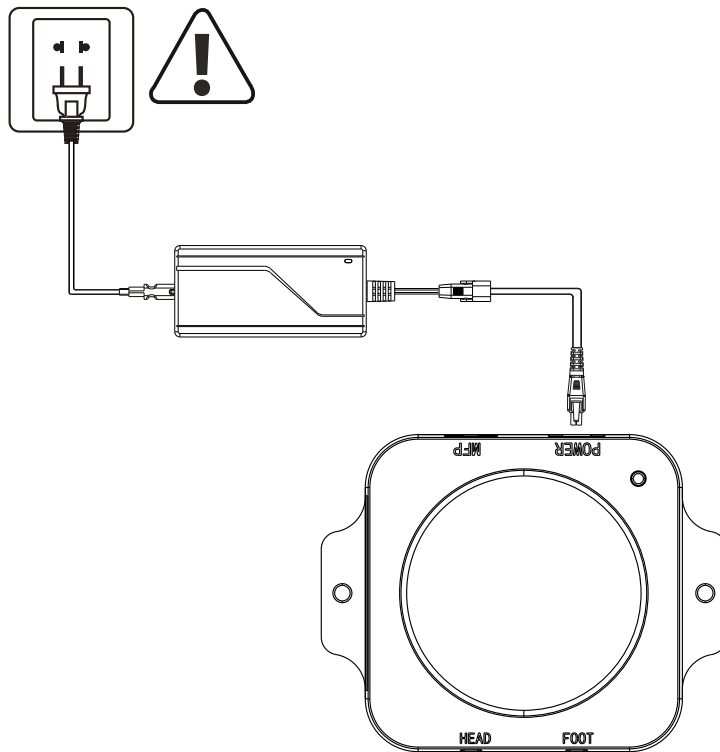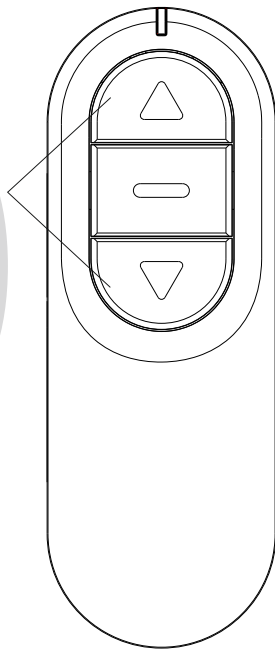

1. Odłącz zasilacz, a następnie, po zgaśnięciu wskaźnika zasilacza, ponownie włącz zasilanie. W ciągu 10 sekund od włączenia zasilania podpórki naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski  i .
2. Lampka kontrolna pilota zacznie migać, wskazując, że pilot wszedł w tryb parowania z podpórką, a następnie zgaśnie po pomyślnym sparowaniu, w przeciwnym razie nadal będzie migać.


Instalacja podpórki

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa regulowana podpórka do łóżka musi być zawsze montowana przez 2 osoby, a przed otwarciem produkt powinien zawsze znajdować się na płaskiej powierzchni.

KROK 1

Usuwanie opasek zaciskowych

Wyjmij z pudełka regulowaną podpórkę do łóżka. Połóż podpórkę na płaskiej powierzchni w taki sposób aby pokrowiec z tkaniny był skierowany do dołu. Usuń pomarańczową opaskę zaciskową w miejscu wskazanym strzałką.

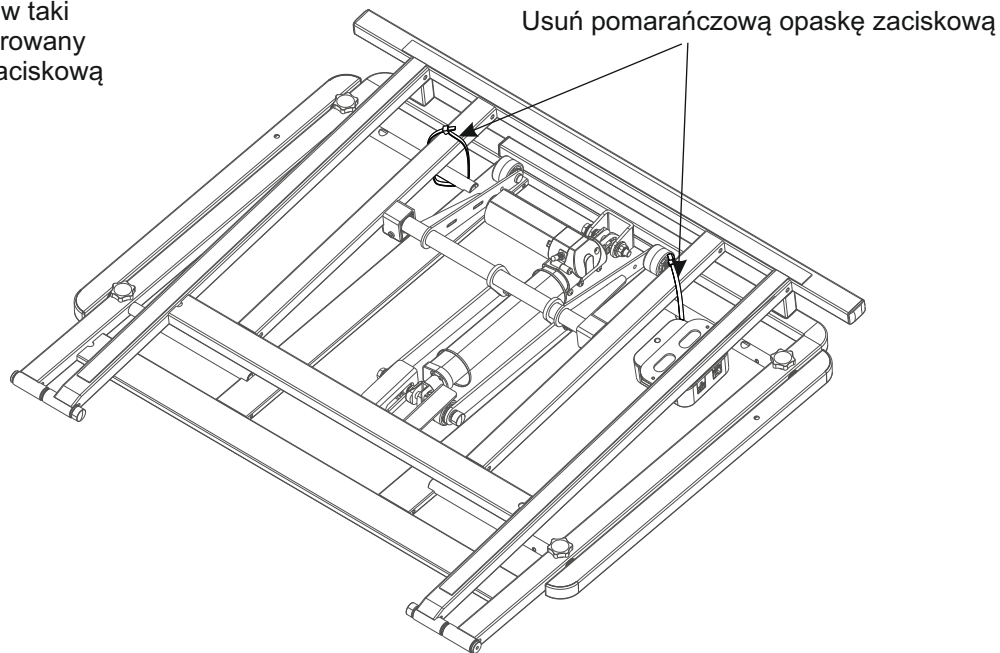

KROK 2

Umieszczanie podpórki na ramie łóżka

Połóż na łóżku podpórkę w taki sposób, aby pokrowiec z tkaniny był skierowany do góry.


Jeśli rama łóżka użytkownika nie ma oparcia, w celu lepszego przymocowania podpórki do ramy łóżka zaleca się stabilizację położenia ramy za pomocą odbojników ściennych i pasów. W przeciwnym razie może to spowodować przemieszczenie się ramy łóżka względem podpórki, gdy ta podnosi się i opada podczas użytkowania.



Podczas korzystania z tego produktu trzymaj go z dala od dzieci, aby zapobiec zakleszczeniu palców dziecka.




Nie umieszczaj zasilacza na łóżku lub ramie łóżka lub ramie podpórki.

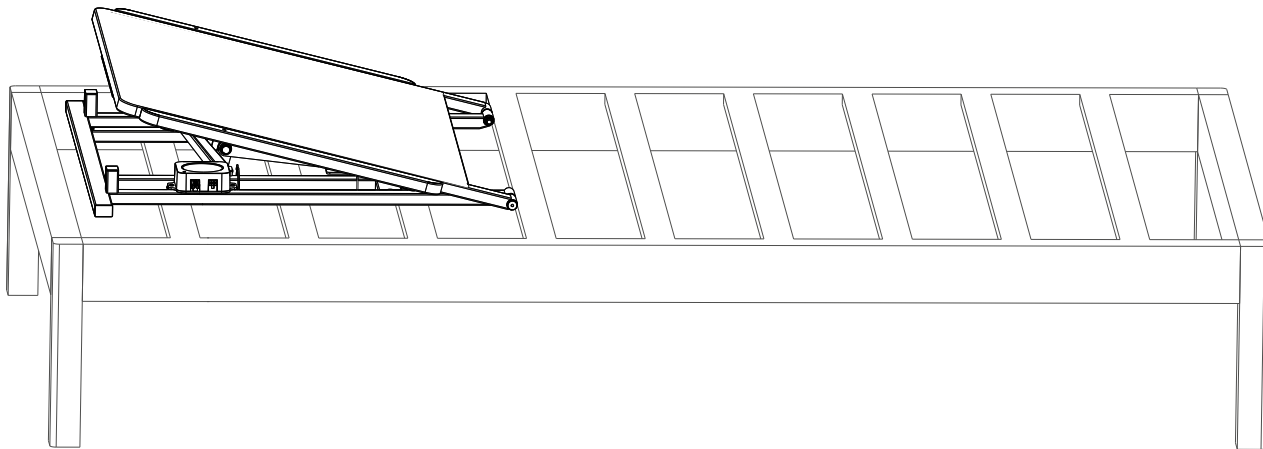

KROK 3

Podłączanie zasilacza


Weź zasilacz i kabel zasilający, włóż kabel zasilający do gniazda zasilacza z jednej strony. Następnie połącz zasilacz, przewodem wychodzącym z drugiej strony zasilacza, z modułem wykonawczym przymocowanym do podpórki. Włóż wtyczkę tego przewodu do odpowiedniego gniazda w module wykonawczym. Podłącz kabel zasilający do gniazdku 230 V AC w ścianie.

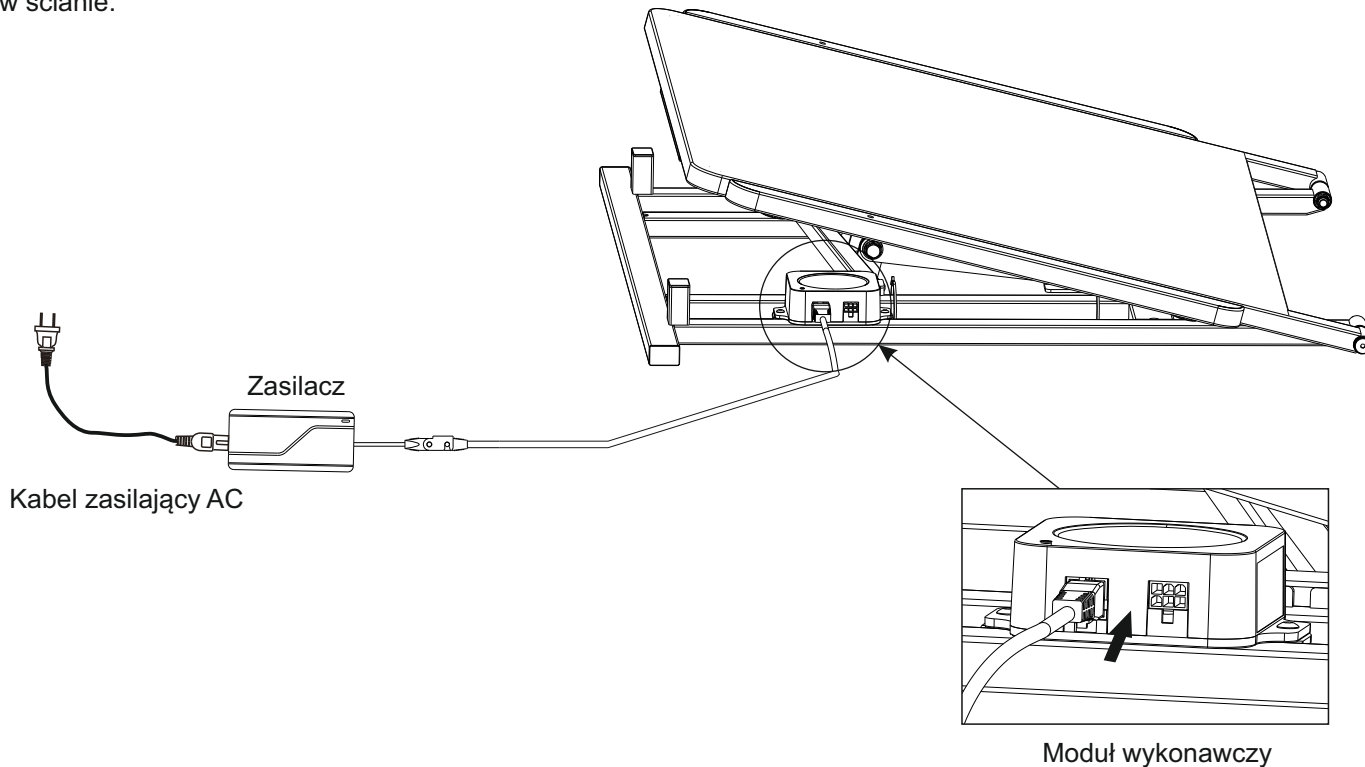

KROK 4

Rozruch próbny podpórki łóżka


Za pomocą pilota zdalnego sterowania podnieś i opuść podpórkę łóżka jeden raz, aby upewnić się, że produkt może być normalnie używany, a następnie wykonaj pozostałe kroki instalacji.

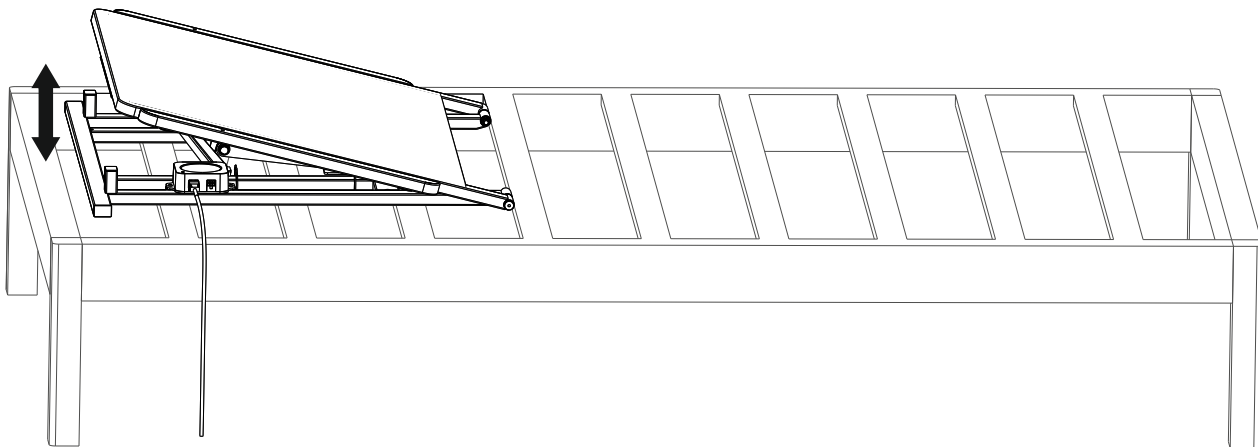

KROK 5

Montaż pasów


- 1 Połóż podpórkę na ramie łóżka tkaniną do dołu i ramą podpórki do góry. Rozwiń dwa pasy gładką stroną do góry. Najpierw przeprowadź pasy nad kwadratową rurką pokazaną na rysunku, a następnie przepuść je przez metalowe klamry.

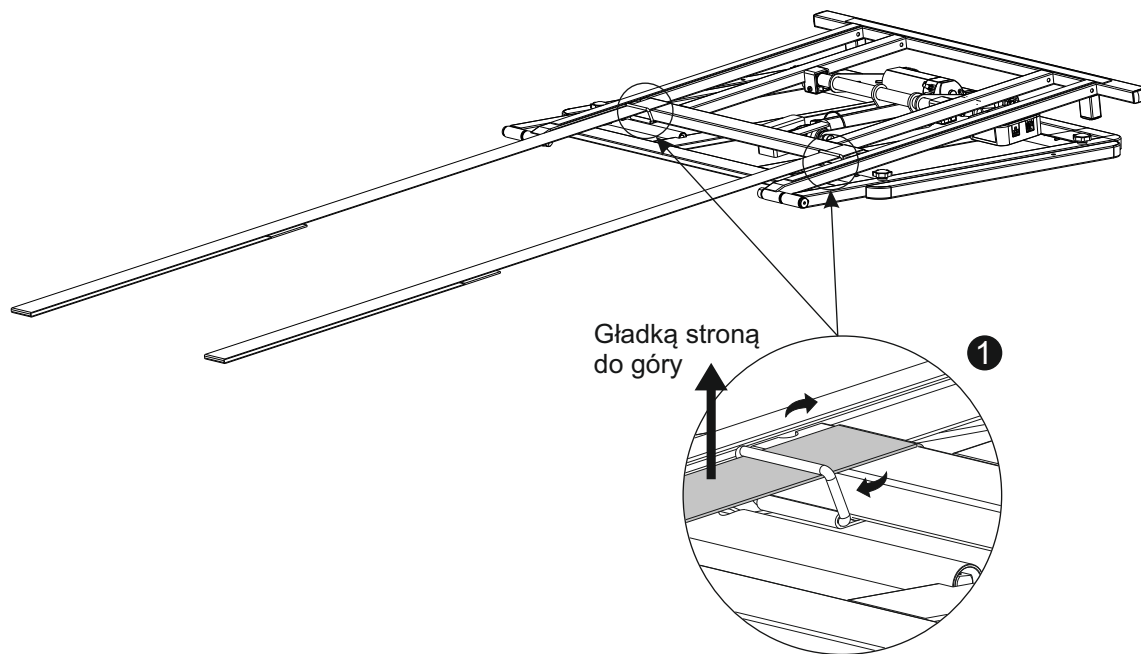

KROK 5

Montaż pasów

- 2 Odwróć podpórkę w taki sposób, aby była skierowana pokrowcem do góry. Weź ograniczniki tylne i przełóż pasy przez otwory w tych ogranicznikach. (Uwaga: Nie przekręcaj, nie odwracaj na drugą stronę i nie skręcaj pasów).

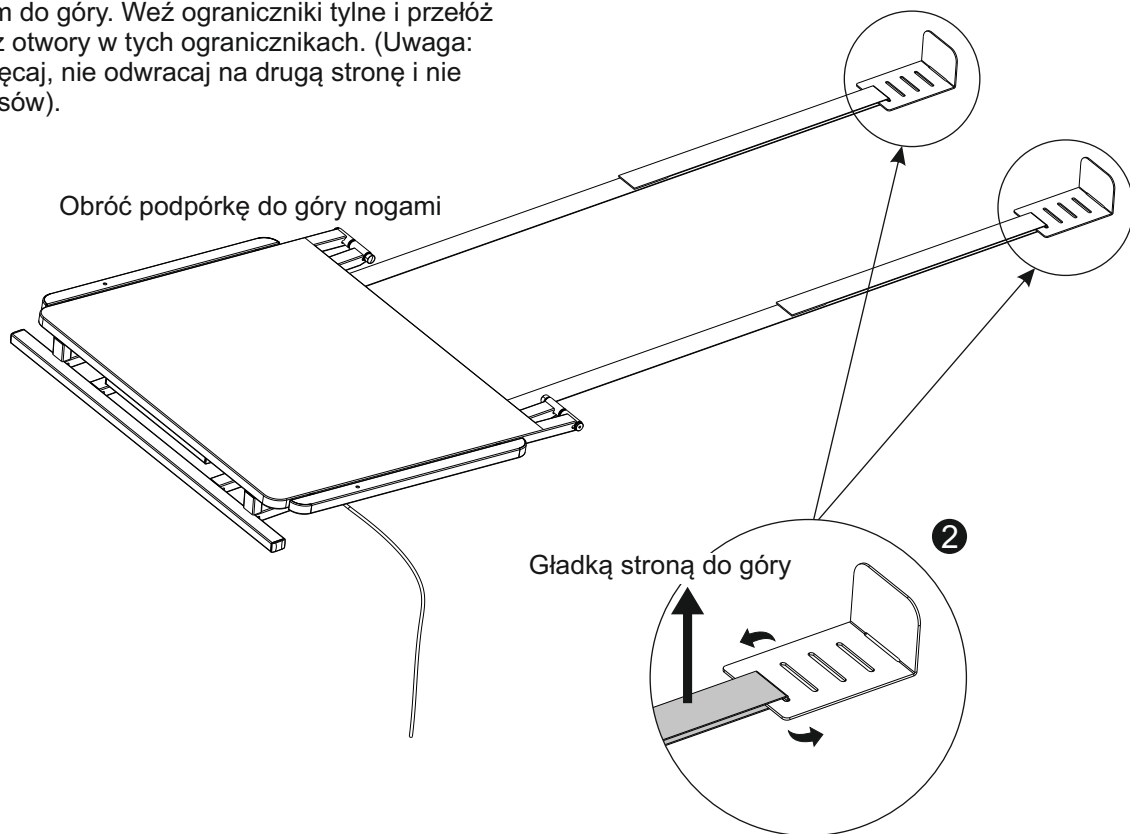


Pasy muszą przechodzić przez otwory w ogranicznikach tylnych.

KROK 6

Montaż odbojników ściennych



Aby zapobiec kolizji podpórki bezpośrednio ze ścianą lub wezłowiem łóżka podczas ruchu podpórki, co może spowodować uszkodzenie ściany lub wezłowia, na ścianie lub wezłowiu łóżka należy zainstalować odbojnik ścienny.

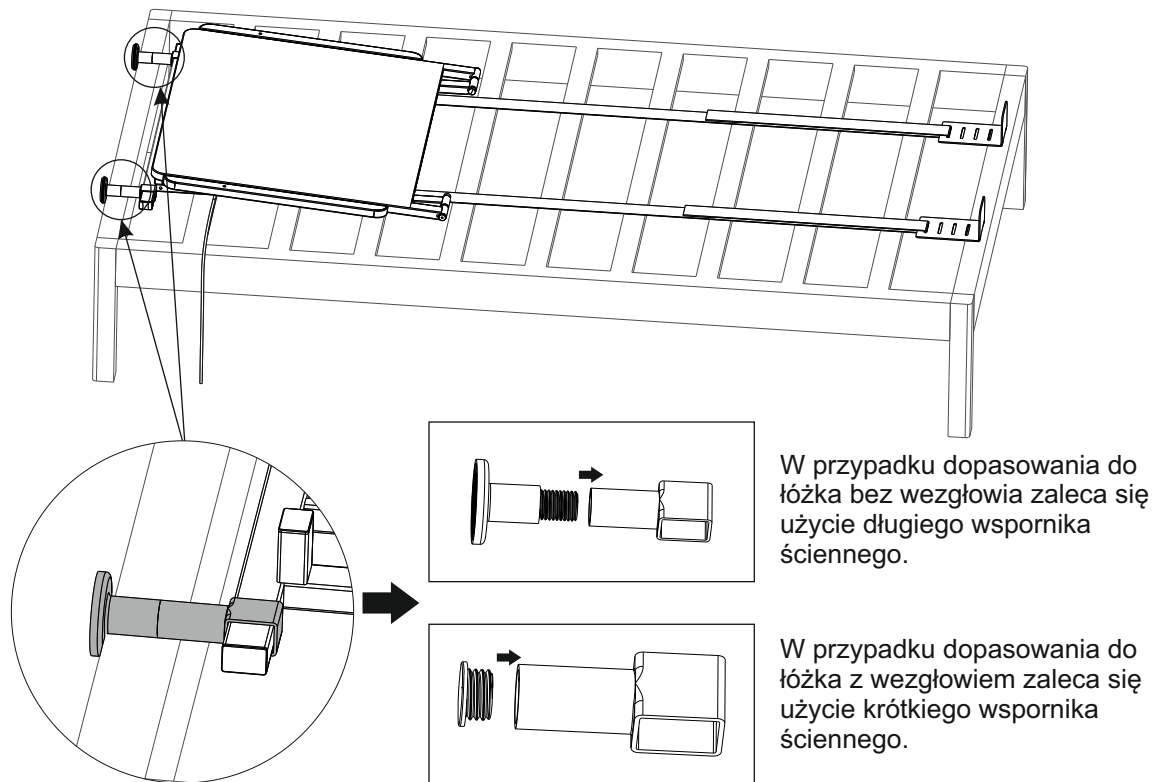


KROK 7

Montaż ograniczników bocznych

Zamontuj lewy i prawy ogranicznik boczny na listwach ramy podpórki regulujących szerokość podpórki. Trzpienie na lewym i prawym ograniczniku są wyrównane z otworami kwadratowej rury i zaciśnięte w kwadratowej rurze, aby zapobiec przesuwaniu się ograniczników w górę i w dół.

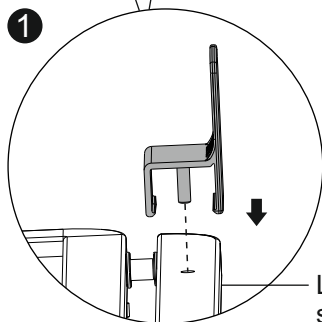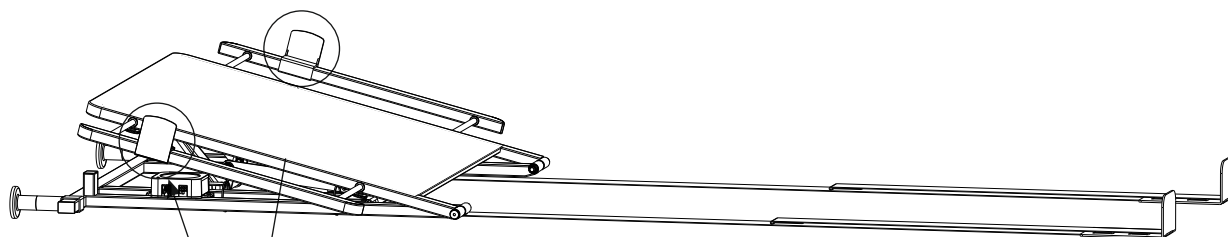

Listwa regulująca
szerokość podpórki.

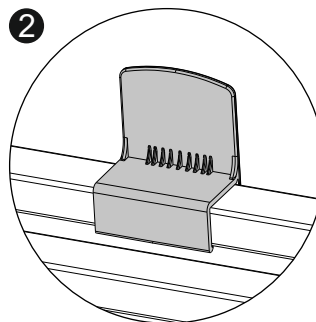


Nałóż lewy i prawy ogranicznik na lewą i prawą kwadratową listwę po obu stronach ramy podpórki, a następnie włóż trzpienie do otworów w kwadratowych listwach.

KROK 8

Regulacja ograniczników tylnych

Wyreguluj długość pasów tak, aby ograniczniki tylne znajdowały się w jednej linii z końcem materaca.
(Uwaga: pasy nie powinny być skręcone i zwinięte, muszą być napięte).

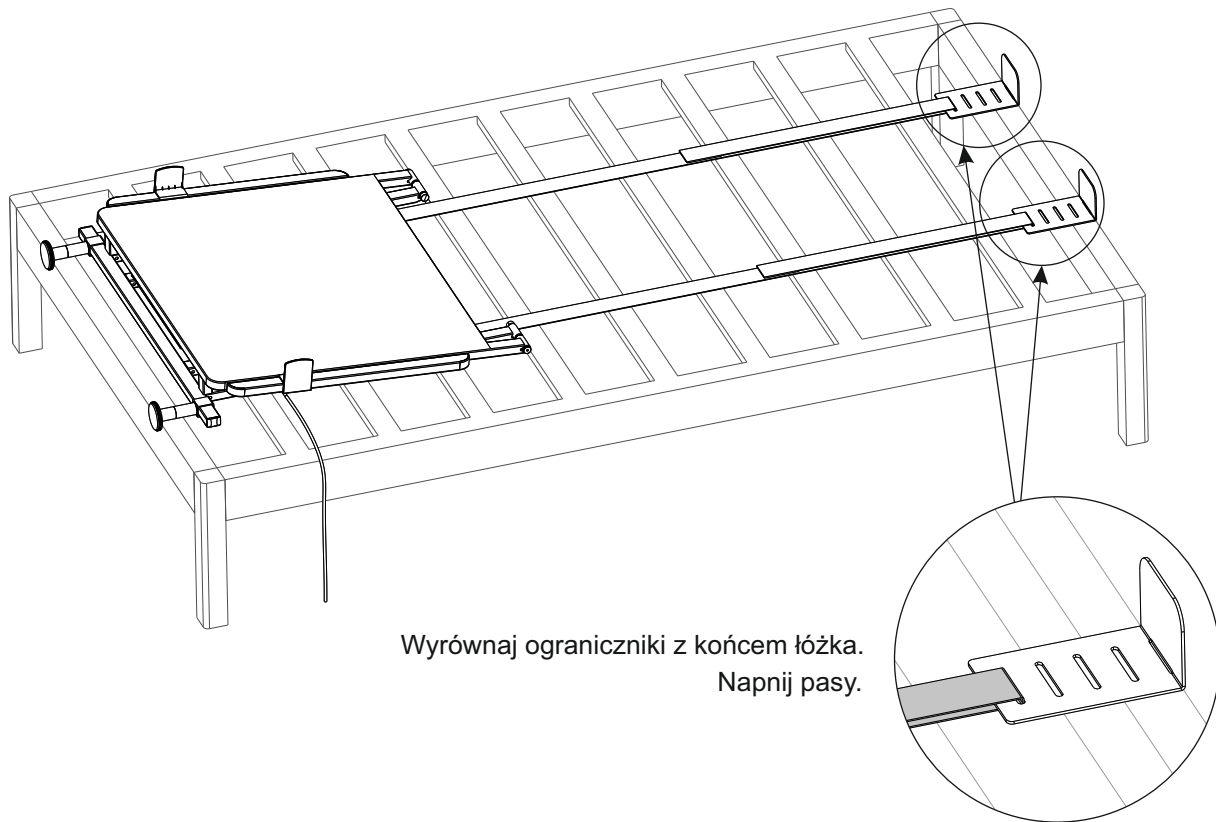


Wyrównaj ograniczniki z końcem łóżka.
Napij pasy.

KROK 9

Regulacja szerokości podpórki



Uwaga: Wybierz odpowiedni model produktu i szerokość podpórki, w zależności od szerokości materaca. Zaleca się, aby szerokość podpórki była nieco mniejsza niż szerokość materaca.

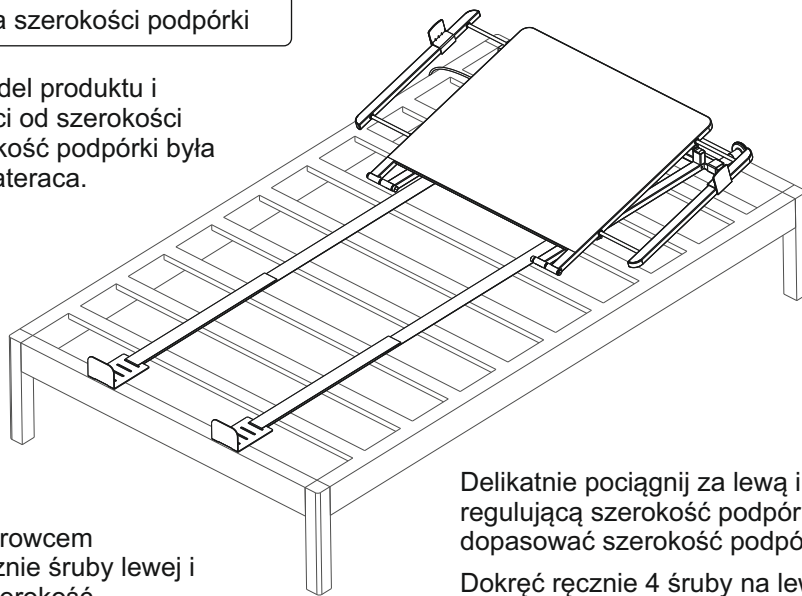

Unieś podpórkę wraz z pokrowcem materiałowym i poluzuj ręcznie śruby lewej i prawej listwy regulującej szerokość podpórki, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Delikatnie pociągnij za lewą i prawą listwę regulującą szerokość podpórki, tak aby dopasować szerokość podpórki do materaca.


Dokręć ręcznie 4 śruby na lewej i prawej listwie regulującej szerokość podpórki, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zapobiec wypadnięciu listew.

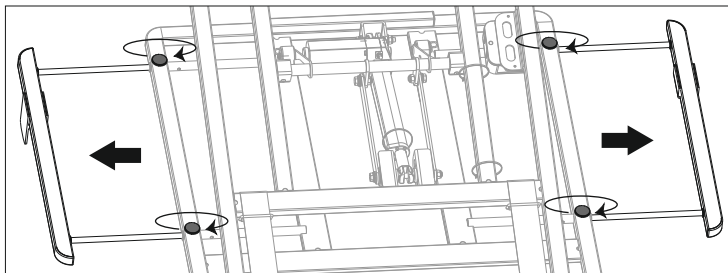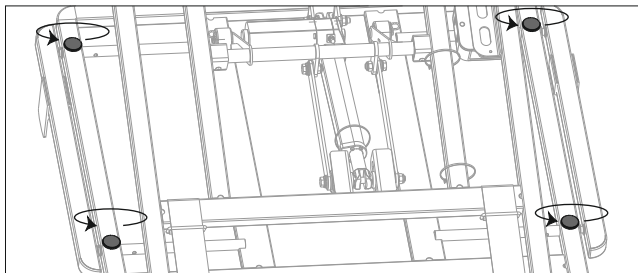

KROK 10

Umieszczanie materaca na podpórcę

Za pomocą pilota zdalnego sterowania podnieś i opuść podpórkę jeden raz, aby sprawdzić, czy produkt może być normalnie używany.

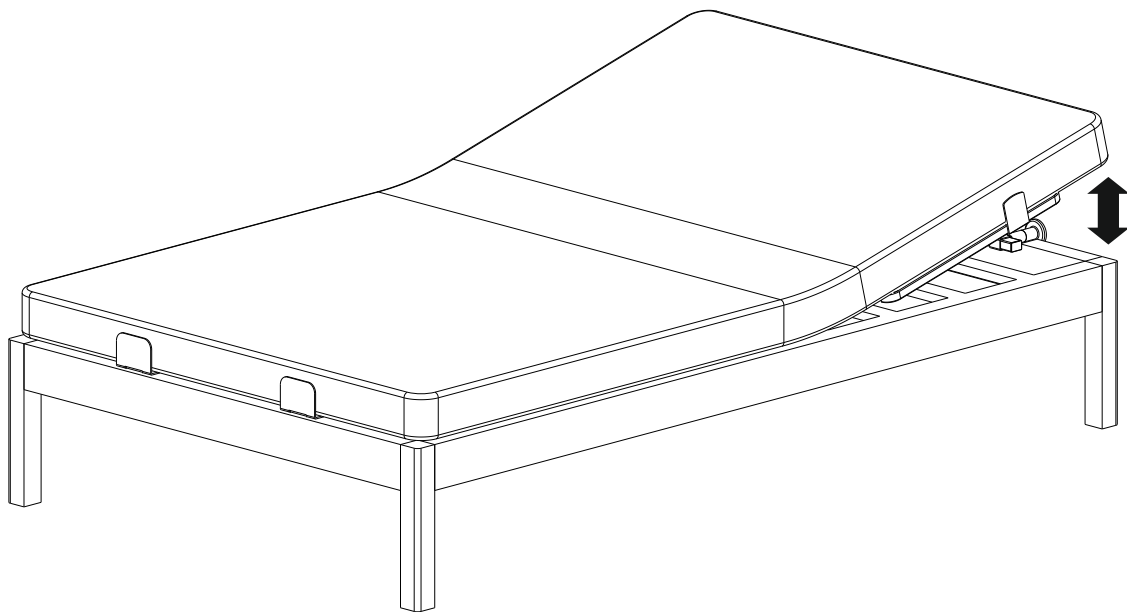

Rozwiązywanie problemów

W przypadku nieprawidłowego działania podpórki, zapoznaj się z odpowiednim rozwiązaniem problemu zamieszczonym w poniższej tabeli.

Problem	Rozwiązanie problemu
Nie aktywuje się i/lub nie działa żadna funkcja podpórki.	1. Sprawdź, czy blokada rodzicielska jest włączona, naciskając przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli blokada rodzicielska jest włączona, lampka kontrolna mignie dwukrotnie, a podpórka nie będzie wykonywać żadnych operacji. Aby odblokować pilot zdalnego sterowania, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie "Funkcja blokady rodzicielskiej", aby wyłączyć blokadę. 2. Upewnij się, że wszystkie przewody zasilające są prawidłowo podłączone. 3. Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do działającego gniazdka elektrycznego. Odłącz kabel zasilający od gniazdka. Po 30 sekundach podłącz go ponownie. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby sprawdzić, czy podpórka działa. 4. Pilot zdalnego sterowania nie jest sparowany z podpórką, wykonaj czynności opisane w sekcji [Parowanie podpórki z pilotem zdalnego sterowania], aby sparować podpórkę z pilotem.
Podpórka podnosi się normalnie, ale nie może powrócić do pozycji "na płasko".	1. Zmiana kąta nachylenia podpórki może być blokowana przez jakieś przeszkody (np. przedmioty, śmieci). Usuń przeszkody wokół podpórki i pod nią. 2. Sprawdź, czy podpórka nie znajduje się zbyt blisko ściany lub czy wspornik ścienny jest prawidłowo zainstalowany.
Podpórka piszczy podczas zmiany kąta podparcia.	1. Podpórka i materac nie są zamocowane. Sprawdź, czy wspornik ścienny jest prawidłowo zainstalowany. 2. Sprawdź, czy pasy mocujące materac nie są splątane lub czy ogranicznik materaca jest prawidłowo zainstalowany. Jeśli występuje któryś z powyższych problemów, skoryguj mocowanie pasów i/lub ograniczników zgodnie z instrukcją obsługi. 3. Sprawdź, czy materac jest prawidłowo unieruchomiony przez ogranicznik tylny i ograniczniki boczne.
W trakcie zmiany kąta podparcia nastąpiło zatrzymanie ruchu podpórki.	1. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, śmieci lub przeszkody znajdujące się pod podpórką i wokół niej. 2. Sprawdź czy moduł wykonawczy i przewód biegnący od gniazdka do silnika elektrycznego są dobrze podłączone.

Jeśli problemu nie można rozwiązać postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Uwagi

01. Przed włączeniem zasilania sprawdź, czy napięcie jest prawidłowe i czy spełnia wymagania dotyczące zasilania tego produktu: AC 100÷240V, częstotliwość 50/60 Hz.
02. Ten produkt nadaje się wyłącznie do użytku domowego, nie jest zalecany do użytku poza pomieszczeniami zamkniętymi.
03. Miejsce, w którym znajduje się ten produkt, nie powinno być zbyt wilgotne ani narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Konieczne jest utrzymanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza, aby nie wpływać na normalne użytkowanie tego produktu.
04. Nie używaj płynów na tym produkcie, w przypadku rozlania odłącz przewód zasilający w bezpieczny sposób. Przed ponownym użyciem upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy.
05. Ten produkt musi być chroniony przed wilgocią, wodą, słońcem, wstrząsami, upadkiem i deptaniem podczas przenoszenia lub transportu. Podczas przenoszenia należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.
06. Nie kładź ostrych przedmiotów (kluczy, noży, цапжów do paznokci itp.) ani twardych przedmiotów na tym produkcie, aby uniknąć jego uszkodzenia.
07. Dzieci nie powinny obsługiwać ani używać tego produktu samodzielnie, ani bawić się nim.
08. Przed użyciem tego produktu upewnij się, że pod łóżkiem nie znajdują się ludzie ani zwierzęta.
09. Kabel zasilający musi być wyciągnięty od spodu urządzenia i włożony do gniazdka, aby mieć pewność, że nie zostanie przyciśnięty i uszkodzony podczas pracy urządzenia.
10. Elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp. znajdujące się w skrzynce elektrycznej powinny być utylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w różnych krajach i nie należy ich utylizować zgodnie z konwencjonalnymi odpadami domowymi.
11. Gdy produkt znajduje się w położeniu podniesionym, nie przenoś całego ciężaru ciała na wezglowie łóżka, aby nie uszkodzić konstrukcji.
12. Gdy produkt jest w położeniu "na płasko", nie uprawiaj sportów wiążących się z silnymi uderzeniami, takich jak skoki.
13. Osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy i uprawnień nie mogą demontować konstrukcji podpórki sterowanej elektrycznie oraz silnika, aby nie spowodować nieodwracalnego uszkodzenia tego urządzenia.
14. Ten produkt został fabrycznie wyposażony w odpowiedni pilot zdalnego sterowania, który należy obsługiwać i używać zgodnie z instrukcją obsługi.
15. Po zainstalowaniu zasilacza użyj pilota zdalnego sterowania, aby sprawdzić, czy funkcje urządzenia działają prawidłowo.
16. Nie otwieraj ani nie manipuluj przy module wykonawczym, silniku elektrycznym i pilocie zdalnego sterowania. Wszelkie przeróbki urządzenia spowodują utratę gwarancji.
17. Maksymalna nośność tego produktu dotyczy całego łóżka, a nie samego jego wezglowia; nie można zagwarantować, że nie wystąpią uszkodzenia spowodowane przekroczeniem nośności tego produktu.
18. Zaleca się noszenie wyposażenia ochronnego podczas montażu i demontażu tego produktu.



To oznaczenie informuje, że produktu tego nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

RoHS

MADE IN P.R.C.



Niniejszym Spacetronik Sp. z o.o oświadcza, że urządzenie SPBDORMEE jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: EMC (2014/30/UE), LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE). Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.spacetronik.store. Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Wyprodukowano w P.R.C. dla:

Spacetronik Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Polska

info@spacetronik.store

www.spacetronik.store